

# Oticlin Kids

## do higieny uszu

Oticlin Kids do higieny uszu jest wyrobem medycznym. Przed zastosowaniem Oticlin Kids do higieny uszu należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki. Ulotkę należy zachować.

1. DLACZEGO NALEŻY CZYSZCIC USZY?
2. CO TO JEST OTICLIN KIDS DO HIGIENY USZU?
3. W JAKI SPOSOB UŻYWAĆ OTICLIN KIDS DO HIGIENY USZU?
4. CZY OTICLIN KIDS DO HIGIENY USZU MOŻE BYĆ UŻYWANY PRZEZ DZIECI NOSZĄCE APARATY SŁUCHOWE?
5. CZY UŻYWANIE OTICLIN KIDS DO HIGIENY USZU WIĄŻE SIĘ Z JAKIMIS RYZYKIEM?
6. DLACZEGO OTICLIN KIDS DO HIGIENY USZU JEST BEZPIECZNY W UŻYCIU?
7. DLACZEGO NIE ZALECA SIĘ UŻYWANIA PATYCZKOW KOSMETYCZNYCH DO CZYSZCZENIA USZU?
8. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
9. DANE KONTAKTOWE

### 1. DLACZEGO NALEŻY CZYSZCIC USZY?

Woskowina (wosk uszny) jest wydzielana w celu samooczyszczania przewodu słuchowego zewnętrznego. Wiąże brud, bakterie i inne zanieczyszczenia. Zwykle usuwana jest w sposób naturalny, dzięki mechanizmowi samooczyszczania, wspomaganemu ruchami żuchwy.

Czasami dochodzi do nadmiernego wydzielania i gromadzenia się woskowiny. Sprzyja to tworzeniu się tzw. korków woskowinowych, które mogą powodować występowanie objawów, takich jak:

- ból ucha
- wrażliwość zatkania lub dzwonienia w uchu
- upośledzenie słuchu
- nieprzyjemny zapach z ucha
- zawroty głowy
- kaszel

Nadmierne wydzielanie woskowiny występuje szczególnie u dzieci, które noszą aparaty słuchowe lub stopery do uszu. Na nadmierne odkładanie się woskowiny narażone są dzieci z upośledzeniem czynności poznawczych. U niektórych dzieci kształt przewodu słuchowego może utrudniać naturalne usunięcie woskowiny.

### 2. CO TO JEST OTICLIN KIDS DO HIGIENY USZU?

Oticlin Kids do higieny uszu to nowoczesny wyrób medyczny, oparty na technikach stosowanych przez otolaryngologów. Oticlin Kids do higieny uszu zawiera specjalistyczną formułę myjącą, która wypłukuje nadmiar woskowiny z przewodu słuchowego. Oticlin Kids do higieny uszu to prosty i skuteczny sposób na regularne oczyszczanie przewodów słuchowych w warunkach domowych. Tak jak szczotkowanie zębów, oczyszczanie uszu powinno stać się częścią codziennego dbania o zdrowie i higienę. Aby zapobiegać infekcjom uszu i pogorszeniu słuchu, zaleca się używanie Oticlin Kids do higieny uszu, który wypłukuje nadmiar woskowiny.

Oticlin Kids do higieny uszu jest szczególnie przydatny dla dzieci:

- narażonych na zaleganie wody w przewodzie słuchowym (podczas kąpieli lub uprawiania sportów wodnych)
- z woskową zalegającą w przewodzie słuchowym
- korzystających z aparatów słuchowych, zatyczek lub słucharek do uszu

### 3. W JAKI SPOSOB UŻYWAĆ OTICLIN KIDS DO HIGIENY USZU?

Oticlin Kids do higieny uszu jest przeznaczony do używania w warunkach domowych, pod nadzorem osoby dorosłej, u dzieci od 3. roku życia:

- obciążonych o higienę przewodu słuchowego
- noszących aparaty słuchowe

Zaleca się używanie Oticlin Kids do higieny uszu co drugi dzień.

Oticlin Kids do higieny uszu najlepiej używać podczas kąpieli. Przed pierwszym użyciem Oticlin Kids do higieny uszu należy przepłukać go 2-krotnie czystą wodą. Następnie zassać letnią wodę (maks. temp. 40°C) i przepłukać nią przewód słuchowy, zgodnie z poniższą instrukcją. Specjalistyczna formuła myjąca zawarta w rurce, nie tylko ułatwia oczyszczanie, ale także wskazuje poziom jej zużycia. Niebieska formuła myjąca wystarcza na ok. 30 dni. Po tym czasie, Oticlin Kids do higieny uszu należy wymienić na nowy.

### Instrukcja użycia

**Pompka ssąca:** Ścisnąć pompkę, aby zassać letnią wodę (maks. temp. 40°C). Woda zmieszana się z formułą myjącą zawartą w dolnej części rurki Oticlin Kids do higieny uszu. Następnie delikatnie przepłukać nią przewód słuchowy. Przechylić głowę na bok, umieścić końcówkę rozpylającą przy wejściu do przewodu słuchowego i nacisnąć pompkę 3 razy. Specjalistyczna formuła myjąca rozmięknie woskowinę. Przechylić głowę w przeciwnym kierunku, aby opróżnić przewód słuchowy. Następnie używając pompki nienapełnionej wodą, wdmuchnąć powietrze do przewodu słuchowego, w celu usunięcia pozostałej wilgoci.

**Końcówka rozpylająca:** Kształt i rozmiar końcówki uniemożliwiają przypadkowe wsuniecie jej zbyt głęboko do ucha.

**Łagodna i skuteczna formuła myjąca:** Składniki zawarte w rurce Oticlin Kids do higieny uszu po zmieszaniu z letnią wodą wytwarzają roztwór myjący. Gdy z rurki zniknie kolor niebieski, oznacza to, że zużyła się formuła myjąca i należy wymienić Oticlin Kids do higieny uszu na nowy.

Zaleca się używanie Oticlin Kids do higieny uszu co drugi dzień. Trudna do usunięcia, zalegająca woskowina może wymagać używania Oticlin Kids do higieny uszu przez kilka dni. Nie należy używać Oticlin Kids do higieny uszu dłużej niż przez 30 kolejnych dni.

### 4. CZY OTICLIN KIDS DO HIGIENY USZU MOŻE BYĆ UŻYWANY PRZEZ DZIECI NOSZĄCE APARATY SŁUCHOWE?

Oticlin Kids do higieny uszu przeznaczony jest do regularnego używania, szczególnie u dzieci noszących aparaty słuchowe (Oticlin Kids do higieny uszu należy używać podczas wieczornej kąpieli - przed snem), co zapewnia właściwą higienę przewodu słuchowego, niezbedną do prawidłowego działania aparatu słuchowego.

### 5. CZY UŻYWANIE OTICLIN KIDS DO HIGIENY USZU WIĄŻE SIĘ Z JAKIMIS RYZYKIEM?

Oticlin Kids do higieny uszu jest dobrze tolerowany i został opracowany z myślą o dzieciach od 3. roku życia. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy zaprzestać używania Oticlin Kids do higieny uszu. Nie używać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

**⚠ Produktu nie należy używać bez konsultacji z lekarzem w przypadku: zapalenia ucha, bólu ucha, perforacji błony bębenkowej lub u osób podatnych na zawroty głowy, a także u osób, u których w przeszłości występowały schorzenia uszu lub błony bębenkowej. Korek woskowinowy może nie dawać żadnych objawów. Pod wpływem działania Oticlin Kids do higieny uszu korek woskowinowy może pęknąć, powodując dyskomfort. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.**

• Oticlin Kids do higieny uszu nie powinien być używany u dzieci poniżej 3. roku życia oraz w stanach zapalnych przewodu słuchowego lub błony bębenkowej.

• Oticlin Kids do higieny uszu należy używać pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używać u dzieci poniżej 3. roku życia. Drobne części mogą być przyczyną zadławienia – przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Oticlin Kids do higieny uszu nie należy używać u dzieci:

- z uszkodzoną (np. perforacją) lub zdeformowaną błoną bębenkową
- u których w przeszłości doszło do uszkodzenia przewodu słuchowego
- Wyrobu medycznego Oticlin Kids do higieny uszu nie należy używać dłużej niż przez 30 kolejnych dni.

**⚠ W przypadku zablokowania przewodu słuchowego przez korek woskowinowy zaleca się konsultację u otolaryngologa. Po oczyszczeniu przewodu słuchowego przez lekarza, zaleca się regularne używanie Oticlin Kids do higieny uszu, aby zapobiec odkładaniu się woskowiny i ponownemu zablokowaniu przewodu słuchowego.**

### 6. DLACZEGO OTICLIN KIDS DO HIGIENY USZU JEST BEZPIECZNY W UŻYCIU?

Oticlin Kids do higieny uszu umożliwiła dokładne wypłukanie zalegającej woskowiny z przewodu słuchowego, bez mechanicznej ingerencji. Zaokrąglony kształt końcówki rozpylacza jest przyjemny w użyciu. Rozmiar końcówki rozpylacza uniemożliwia jej zbyt głębokie wsuniecie do przewodu słuchowego, co chroni przed uszkodzeniem ucha, a zwłaszcza błony bębenkowej. Kończąca rozpylacza działa jak dysza natryskowa. Jej opłetnowany kształt zapewnia optymalne rozprzodzenie roztworu myjącego w przewodzie słuchowym. Nasadka w kształcie oliwki posiada także mechanizm chroniący przed nadmiernym ciśnieniem roztworu myjącego.

### 7. DLACZEGO NIE ZALECA SIĘ UŻYWANIA PATYCZKOW KOSMETYCZNYCH DO CZYSZCZENIA USZU?

Lekarze odradzają używanie patyczków kosmetycznych do czyszczenia uszu, ponieważ mogą być one przyczyną powstania korków woskowinowych. Patyczki kosmetyczne stosowane są na wyciucie, co sprzyja przesuwananiu woskowiny w kierunku błony bębenkowej. Używanie patyczków kosmetycznych może spowodować perforację błony bębenkowej.

### 8. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Oticlin Kids do higieny uszu
- Ulotka informacyjna

SKŁAD: SÓL SODOWA KWASU ŁOJOWEGO, GLYCERYNA, WODA, SORBITOL, SACHAROZA, PEG-4001, WERSENIAN CZTEROSODOWY.

PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (10-25°C).  
ZUŻYĆ W CIĄGU 8 MIESIĘCY OD DATY PRZEWIĄSZEJ UŻYCIA.  
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

### 9. DANE KONTAKTOWE

#### Dystrybutor

VITAMED  
ul. Ostrowskiego 24  
97-213 Szmardzewo  
Polska  
www.vitamed.pl  
www.vitamedive.pl

#### Wytwórca

TheOTClab  
Paulus Potterstraat 20  
1071 DA Amsterdam  
Holandia  
www.theotclab.com

Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2018



10ml



V9753804/1811